

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla laktatorów

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Laktator jest urządzeniem medycznym/osobistym służącym do odciągania pokarmu. Niewłaściwe użytkowanie, brak higieny lub błędy w konserwacji mogą prowadzić do urazów piersi, infekcji, porażenia prądem lub zanieczyszczenia pokarmu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Ryzyko zranienia (Krytyczne):** Nigdy nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu siły ssania na początku pracy. Zbyt silne podciśnienie może spowodować ból, pęknięcie naczyń krwionośnych oraz uszkodzenie brodawek sutkowych. Jeśli odczuwasz ból, natychmiast przerwij odciąganie i skonsultuj się z doradcą laktacyjnym.
- **Higiena i ryzyko infekcji (Krytyczne):** Laktator jest produktem osobistym. Używanie jednego urządzenia przez więcej niż jedną osobę stwarza ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych oraz bakterii. Przed każdym użyciem należy dokładnie umyć ręce oraz wszystkie elementy mające kontakt z pokarmem.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj laktator, zasilacz oraz małe elementy (zaworki, membrany, uszczelki) w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części stanowią poważne zagrożenie zadławienia, a przewody zasilające stwarzają ryzyko uduszenia.
- **Użytkowanie w ciąży:** Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem laktatora, ponieważ stymulacja piersi może wywołać skurcze macicy.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i techniczne

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej ani zasilacza w wodzie lub innych cieczach. Nie używaj laktatora elektrycznego podczas kąpieli lub pod prysznicem. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie wyciągaj go przed odłączeniem zasilania.
- **Zasilanie:** Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do zestawu. Stosowanie zamienników może doprowadzić do przegrzania urządzenia, pożaru lub uszkodzenia akumulatora litowo-jonowego.
- **Praca z płynami:** Upewnij się, że pokarm nie dostaje się do przewodów powietrznych lub jednostki napędowej (silnika). Jeśli zauważysz płyn w rurkach, natychmiast wyłącz urządzenie i wyczyść elementy zgodnie z instrukcją.
- **Przegrzewanie:** Nie używaj laktatora podczas snu ani w stanie silnego zmęczenia, które mogłoby doprowadzić do zaśnięcia podczas pracy urządzenia i jego przegrzania przy ciele.

3. Konserwacja i czyszczenie

- **Sterylizacja:** Wszystkie elementy mające kontakt z pokarmem (lejki, butelki, zaworki) muszą być regularnie sterylizowane (wrzątek, sterylizator parowy). Niedostateczna dezynfekcja może prowadzić do rozwoju pleśni i bakterii wewnątrz urządzenia, co zagraża zdrowiu dziecka.
- **Kontrola stanu części:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy silikonowe membrany i zaworki nie są pęknięte lub naderwane. Uszkodzone elementy obniżają siłę ssania i mogą powodować nieprawidłową pracę urządzenia.
- **Czyszczenie jednostki napędowej:** Silnik należy wycierać wyłącznie czystą, lekko wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.

4. Utylizacja

- **ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny):** Laktatory elektryczne zawierają akumulatory i podzespoły elektroniczne. Nie wolno ich wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów. Elementy plastikowe (butelki, lejki) po dokładnym umyciu mogą trafić do pojemnika na tworzywa sztuczne, o ile pozwala na to lokalny system segregacji.
- **Opakowanie:** Kartonowe pudełka i instrukcje papierowe należy umieścić w pojemniku na papier, a folie zabezpieczające w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne.